

# フロー・サイナスケア

鼻うがい


毎日の簡単習慣、これからの口腔ケアに鼻うがいを。



洗浄液は、人体にとっても近い成分(等張電解質液)なので、刺激は少なく、鼻腔内がすっきりします。  
※防腐剤・香料などは入っていません。



# Features

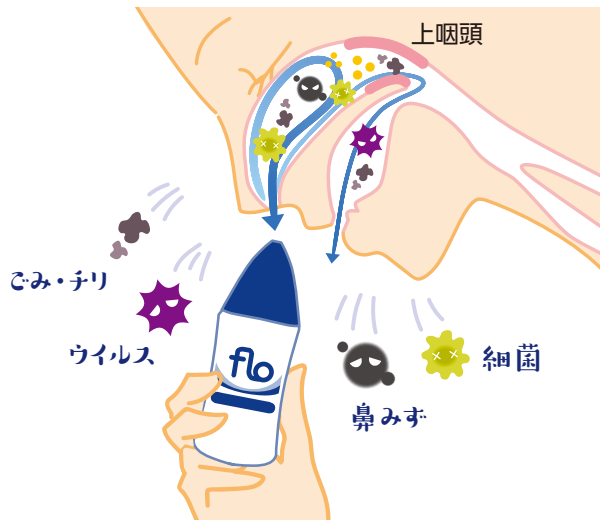

## 鼻の奥まで洗浄液が届く

鼻の奥は、外部から侵入する異物に接しやすい部位なので、いつも清潔にしておくことが重要です。温かな洗浄液が鼻腔内を優しく洗浄します。



## 使いやすい洗浄用ボトル

ボトルを軽く押すだけで洗浄液が鼻腔内を優しくしっかり流れます。吸う動作は必要ありません。広い開口部は洗浄剤(粉)を入れやすく、使用後のボトル洗浄、乾燥がしやすい構造です。

## お子さま(4歳以上)から大人まで手軽にお使いいただけます



**1** ひと肌程度に温めた安全なお水\*をボトルの線まで入れます。  
\*煮沸水、浄水器を通した水、市販のペットボトル水、精製水、上水道水。  
電子レンジが使えます。



**2** 洗浄剤(小袋)1包の粉をボトルに入れます。キャップをしっかりと閉めて、洗浄剤がすべて溶けるまでボトルを振ります。



**3** 洗面台で前かがみになり、キャップ先端を一方の鼻の穴に軽く当てます。口で息をしながら、そっとボトルを握ると温かい洗浄液が反対側の鼻や口から出てきます。鼻で洗浄液を吸う動作は必要はありません。  
残った洗浄液で反対側の鼻も同じ手順でおこないます。

# Specifications

### フロー・サイナスケア スターターキット

内容物: 洗浄用ボトル+洗浄剤(粉)12包  
標準価格 1,030円 202600110  
参考患者価格 1,200円(税込)

### フロー・サイナスケア 洗浄剤(粉)50包

内容物: 洗浄剤(粉)50包  
標準価格 1,830円 202600111  
参考患者価格 2,100円(税込)

### フロー・サイナスケア 洗浄剤(粉)100包

内容物: 洗浄剤(粉)100包  
標準価格 3,110円 202600112  
参考患者価格 3,600円(税込)

鼻うがいを  
取り入れて  
みませんか?



院内WEBセミナーの申し込みはこちら

手洗い、うがいに続き新たな感染予防対策として鼻うがいが注目されています。エアロゾルや飛沫の感染リスクが高い医院で働くみなさまの健康管理のひとつとしてもご提案いたします。

●標準価格の後の9ケタの数字は品目コードです。●掲載商品の標準価格は、2024年7月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品に添付の説明書を必ずお読みください。

販売名 フロー・サイナスケア 一般名称 鼻用洗浄器 医療機器の分類: 一般(CI) 医療機器届出番号: 27B1X00118000014  
総販売元/連絡先 大綱株式会社 製造販売 有限会社ウイルドント 大阪府大阪市北区西天満3丁目7番22号 〒530-0047  
発売 株式会社 モリタ 大阪本社: 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380 2525 東京本社: 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834 6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)※歯科医療従事者様専用  
www.dental-plaza.com

PUBNo.: M6052.12.2407.5,000IH.IO/ST 208530408